

## Modelo de medição e ajuste

1. Imprima esta folha.
2. Use uma tesoura para recortar as almofadas seguindo as linhas ponteadas. Os modelos são do tamanho real.
3. A **almofada de tamanho Grande é considerada a opção standard** e é ideal para tamanhos de máscara médio, grande e extra grande. A almofada de tamanho Pequeno é ideal para tamanhos de máscara pequeno, extra pequeno e mínimo.
4. Coloque os recortes de papel sobre o seu rosto para determinar o tamanho de almofada correcto a utilizar. **Se recair entre um e outro, recomenda-se o tamanho Grande.**



Como orientação, as asas da almofada devem terminar num ponto entre a pupila e o canto externo dos olhos, como mostra a imagem acima.

A almofada pode ser facilmente ajustada em vários ângulos para acompanhar o contorno das características faciais de cada indivíduo.

**Uma selecção de tamanho e um ajuste correctos aumentam o conforto da máscara.**



Ideal para máscaras de tamanho  
**MÉDIO, GRANDE e EXTRA GRANDE**

### Almofada Grande

Maior largura: 10,7 cm Maior altura: 5,1 cm



Ideal para máscaras de tamanho  
**PEQUENO, EXTRA PEQUENO e MÍNIMO**

### Almofada Pequena

Maior largura: 8,9 cm Maior altura: 3,8 cm



**Gecko™**  
NASAL PAD

© ResMed 2011 618198/1 2011-07